

A mellszívó egyszerű használati utasítása 07

Nyomja meg és tartsa lenyomva a "⌂" gombot 1,5 másodpercig a mellszívó elindításához (a masszázis üzemmód automatikusan aktiválódik), és nyomja meg a mellszívás szüneteltetéséhez.

Nyomja meg a "⌂" gombot az üzemmódváltáshoz (masszázs (stimuláció) / fejés / bionikus)

Masszázs üzemmód "★" (összesen 10 fokozat) Fejés üzemmód "→" (összesen 10 fokozat) Bionikus üzemmód "☼" (összesen 10 fokozat)

Nyomja meg és tartsa lenyomva az üzemmódváltó gombot "★" a vegyes üzemmódba való átváltáshoz (masszázs + fejés, masszázis + bionikus)

Nyomja meg a "☼" vagy "☹" gombot a fejési szint beállításához. Ha a szám folyamatosan villog, az azt jelenti, hogy elérte a maximális vagy minimális szintet. Nyomja meg a "☹" gombot az egyoldali és a kettős fejés közötti váltáshoz.

Bal oldali fejés: a kijelzőn "L" jelenik meg. Jobb oldali fejés: a kijelzőn "R" jelenik meg. Kettős fejés (dupla): a kijelzőn "L R" jelenik meg.

- ⚠ Ennek a mellszívónak az alapértelmezett működési ideje 30 perc, majd automatikusan kikapcsol (a kikapcsolás előtt megjegyzi az előző fejési módot).
- ⚠ A cumisüvegben lévő anyatej mennyisége nem haladhatja meg a Duckbill szelepet (kacsacsőrű szelep), különben a tej túlsordulhat.

A mellszívó működtetése

- Alaposan mosson kezet, és győződjön meg arról, hogy a mellei tiszták. Pihenjen egy kényelmes székben (a hátának alátámasztására használhat párnákat). Győződjön meg róla, hogy van a közelben egy pohár víz.
 - Nyomja a pumpa testét a melléhez. Ügyeljen arra, hogy a mellbimbója középen legyen, hogy a masszázspárna légmentesen zárjon.
 - Nyomja meg a be/kikapcsoló gombot, a mellszívó automatikusan masszázis (stimulációs) üzemmódban indul, és a + és - gombok segítségével változtathatja annak erősségét.
- Amikor az anyatej folyik, megnyomhatja az üzemmódváltót fejésről masszázusra, és kiválaszthatja a legkényelmesebb üzemmódot.
- Figyelem:** Nem kell a maximális módot választania, egyszerűen válassza ki az Önnek legkényelmesebb üzemmódot.
- Amikor befejezte a fejést, kapcsolja ki a mellszívót, és óvatosan vegye le a mellről.
 - Csavarja le a cumisüveget a mellszívóról; készen áll az etetésre/tárolásra. Tisztítsa meg a mellszívó egyéb részeit a 10. "Tisztítás és fertőtlenítés" című részben leírtak szerint.
 - Csatlakoztassa le a motor egységet.

Tisztítás és fertőtlenítés 08

- 1.1 Első használat előtt**
- A mellszívó használata előtt a főmotor kivételével minden alkatrészt tisztítson meg és fertőtlenítsen. Az első alkalommal történő használatkor kövesse az 1.2 és 1.3 szakaszban található tisztítási és fertőtlenítési utasításokat.
- ⚠ Vigyázat:**
- A tisztításhoz csak ivóvizet vagy palackozott vizet használjon.
 - A használat után azonnal szerelje szét a mellszívót, és mossa le az anyatejjel és azzal érintkező összes alkatrészt, hogy megakadályozza a tejmaradványok beszáradását és a baktériumok elszaporodását.

- 1.2 Minden használat után**
- Tisztítson meg minden olyan alkatrészt, amely érintkezik a mellel és az anyatejjel; a főmotort ne tisztítsa meg, az nem sterilizálható. Szerelje szét a szivattyúkészletet egyes részekre. Öblítse le az anyatejjel és mellel érintkezésbe került minden különálló rész hideg vízzel, hogy eltávolítsa az anyatej maradványokat.

- Szükséges kellékek:**
- Enyhe mosogatószer
 - Tiszta mosogató vagy tál
 - Tiszta konyharuha vagy puha cumisüvegkefe
 - Ivóvízminőségű víz

- Tisztítás a mosogatóban:**
- Áztasson minden leválasztott részt meleg, mosogatószeres (szappanos) vízben 5 percig.
 - Tisztítsa meg tiszta konyharuhával vagy puha kefével.
 - Öblítse le az összes leválasztott alkatrészt tiszta vízzel.
 - Hagyja az összes alkatrészt tiszta helyen levegőn megszáradni.
 - A használaton kívüli alkatrészeket száraz helyen tárolja.

- Megjegyzés:**
- Minden használat után mossa el a mellszívó készlet alkatrészeit.
 - Fertőtlenítsa a mellszívókészlet alkatrészeit naponta egyszer.
 - A mellszívó készlet nem igényel különösebb karbantartást.
 - Vigyázzon, hogy a tisztítás során ne sértse meg a mellszívó készlet alkatrészeit.
 - Ha a mellszívó egyes alkatrészeit mosogatógépben tisztítja, az alkatrészek elszíneződhetnek az élelmiszerpigmentektől. Ez nincs hatással a készülék működésére.
 - Tárolja a mellszívó készletet tiszta zacskóban/tartályban a következő használatig.

- 1.3 Napi fertőtlenítés**
- Alaposan mosson kezet.
 - Válasszon szét minden olyan részt, amely érintkezik az emlővel és az anyatejjel.
 - Töltsön meg egy edényt annyi vízzel, hogy minden részét ellepje.
 - Forralja fel a vizet.
 - Helyezze a sterilizálható alkatrészeket forrásban lévő vízbe 10 percre.
 - Hagyja kihűlni a vizet, és óvatosan, egy fogóval vegye ki az alkatrészeket a vízből.
 - Helyezze a részeket egy tiszta felületre vagy egy tiszta konyharuhára.
 - Tárolja az alkatrészeket száraz helyen, amikor nem használja. Ne tárolja nyirkos helyen, ne rakja el addig az alkatrészeket amíg azok nedvesek.

Műszaki adatok 09

- Tápegység bemenet: 100-240V- 50/60Hz
- Tápegység kimenet: 5V --- 1000mA
- Névleges feszültség: 5V
- Névleges teljesítmény: 3W
- Lítium akkumulátor: 3.7V 1500 mAh
- Termék élettartama: 1,5 év
- Rögzített idő: 30 perc
- Szívóerő: 60 mmHg - 280 mmHg
- Korlátozott zajszint: <50 dB
- IP szint: Ip22
- Működési környezeti feltételek: 10-30°C, relatív páratartalom RH 15%-93%, 700-1060 hpa
- Tárolási környezeti feltételek: -25-50°C, relatív páratartalom RH 15%-93%, 700-1060 hpa
- Végrehajtott szabvány: GB4706.1-2005

Újrahasznosítás

Az akkumulátorok olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek szennyezhetik a környezetet. Ne dobja ki az elemeket a normál háztartási hulladékkal együtt; Ehelyett vigye el őket egy hivatalos akkumulátor-gyűjtőhelyre. Ne dobja ki a készüléket a normál háztartási hulladékkal együtt. Ismerkedjen meg az elektromos és elektronikus termékek ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokkal. A készülék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít elkerülni a környezet és az ember egészségének károsodását.

Ellenjavallatok és figyelmeztetések

Ellenjavallatok: Nincsenek ismert ellenjavallatok

- ⚠ Figyelmeztetés:**
- Ez a termék nem több felhasználó számára készült. Egynél több személy általi használata egészségügyi kockázatot jelenthet, érvénytelenítheti a garanciát.
 - Ha a hálózati adapter külső burkolata meglazul vagy elválk, hagyja abba a készülék használatát, és azonnal lépjen kapcsolatba a készülék gyártójával. A burkolat leválása áramütést okozhat.
 - Ha a fejés kényelmetlen vagy fájdalmat okoz, kapcsolja ki a készüléket, újjával törje fel a mell és a mellvédő közötti tömítést, és vegye le a mellvédőt a mellről.
 - Az anyatej fejése megindíthatja a szülést. Ne kezdje meg a fejést a szülésig. Ha szoptatás vagy fejés időszaka közben teherbe esne, a mellszívó további használata előtt konzultáljon engedéllyel rendelkező egészségügyi szakemberrel.
 - Ha Ön hepatitis B-vel, hepatitis C-vel vagy humán immunhiány vírussal (HIV) fertőzött, az anyatej fejése nem csökkenti vagy szünteti meg annak kockázatát, hogy a vírus az anyatejben keresztül átterjedjen a gyermekre.
 - Ne tegye mikrohullámú sütőbe és ne forralja fel az anyatejet. A mikrohullámús melegítés súlyos égési sérüléseket okozhat a baba szájában a tejben lévő forró pontok miatt. (A mikrohullámú sütőben történő melegítés megváltoztathatja az anyatej összetételét is.)

Övintézkedések:

- Használat után azonnal húzza ki az elektromos terméket, kivéve töltéskor.
- Ne helyezze vagy tárolja a terméket olyan helyen, ahol leeshet, vagy ahonnan magával ránthatja egy kádba vagy mosogatóba.
- A mellszívó és tartozékai nem hőállóak: tartsa távol forró felületektől vagy nyílt lángtól.
- Ne használja a mellszívót gyúlékony anyagok közelében.
- A mellszívót soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni, ha az áramforráshoz van csatlakoztatva.
- Soha ne használjon olyan elektromos készüléket, amelynek a kábele vagy a csatlakozódugója sérült, nem működik megfelelően, vagy leesett vagy megsérült.
- Ne használjon olyan elektromos csatlakozóval rendelkező készüléket, amely víznek vagy más folyadéknak volt kitéve, beleértve:
 - Ne használja fürdés vagy zuhanyzás közben.
 - Soha ne tegye vagy ejtse vízbe vagy más folyadékba.
 - Ne engedjen vizet a mellszívó fölé.
 - Ha a készüléket víz vagy más folyadék érte, ne érintse meg; húzza ki a konnektorból, kapcsolja ki és lépjen kapcsolatba a gyártóval.
- Ez a készülék nem szervizelhető vagy javítható. Ne javítsa meg saját maga. Ne végezzen el semmilyen módosítást a készüléken.
- Soha ne használjon sérült készüléket. Cserélje ki a sérült vagy elhasználódott alkatrészeket.
- Csak a mellszívóhoz mellékelt hálózati adaptert használja.
- A mellszívót csak a rendeltetésszerű használatra használja a jelen használati útmutatóban leírtak szerint.
- Ne használja a mellszívót alvás közben, vagy ha túlságosan álmosnak érzi magát.
- Minden használat előtt ellenőrizze a mellszívó minden egyes alkatrészét.
- Ha a cső penészesedik, hagyja abba a használatát, és cserélje ki a csövet.
- Az első használat előtt tisztítson meg és fertőtlenítsen minden olyan alkatrészt, amely érintkezik a mellével és az anyatejjel.
- Minden használat után mosson el minden olyan alkatrészt, amely érintkezik az emlővel és az anyatejjel.
- Szigorú felügyelet szükséges, ha a mellszívót vagy a tartozékokat gyermekek közelében használják.

Köszönjük, hogy az InnoGIO termékeket választotta!

A termék megfelelő használata érdekében kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg ha a jövőben bármilyen kérdése van.

A kézikönyvben használt fotók tájékoztató jellegűek. A fotók és a termék közötti eltérés esetén kérjük, maradjon a tényleges terméknél.

Ha bármilyen kérdése vagy problémája van, kérjük, írjon nekünk e-mailt:

innogio@innogio.com

innogio
INNOGIO sp. z o.o.
utca. Ostródzka 74H, 03-289 Varsó, Lengyelország

www.innogio.cm

@innogio.official @innogio_com



GIO-350PRO

innogio



GIOmom PRO
Dupla elektromos
mellszívó

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Felhasználói kézikönyv verzió: V1.0. Kiadás dátuma: 8/2023

Bevezetés 01


Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a mellszívót. Az Ön új mellszívója kompakt és diszkrétan használható, bárhová magával viheti, hogy a saját kényelme szerint fejhesse le a tejet, és fenntartsa tejellátását. Ez a kézikönyv különböző óvintézkedéseket és alapvető eljárásokat tartalmaz ennek a dupla elektromos mellszívónak a használatához. Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet a készülék használata előtt, és tartsa kéznél a későbbi használatra.

Ez a mellszívó egyedi kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy kényelmesebb testtartást tudjon felvenni. A puha masszázsvédő betét kialakítása lágy és meleg érzést biztosít, és szimulálhatja a baba szopását, lehetővé téve a tej csendes, kényelmes, gyengéd és gyors kiáramlását. A mellszívó kompakt és intelligens, könnyen összeszerelhető. Minden alkatrész mosogatógépben mosható és BPA-mentes.

Ez a mellszívó segíthet a szoptatási időszak meghosszabbításában. Lefejtheti és tárolhatja a tejet. Még akkor is, ha nem tudja szoptatni a babát, megetetheti a mellszívón keresztül lefejtett tejjel. A mellszívó kis és intelligens felépítésének köszönhetően nagyon kényelmes a tej lefejtésére. Ezért bárhová magával viheti, és a saját szabadidejében fejezheti le a tejet, így biztosítva a folyamatos tejellátást a baba számára.

A berendezés vázlatos ábrája


Az alábbi képen az LCD szimbólumok láthatók:

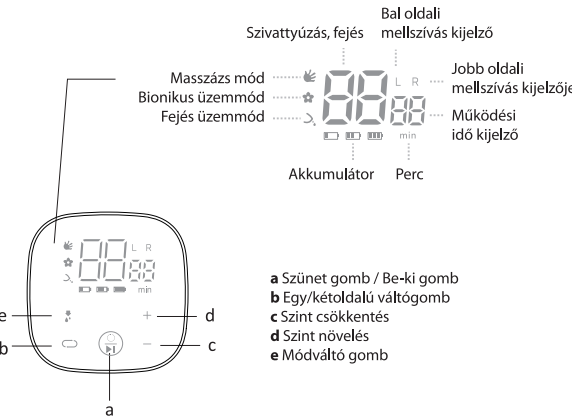

Alkatrész leírása 02

1. Porvédő kupak*
2. Masszázs párna *
3. Mellvédő *
4. Mellszívó egység *
5. Szilikon membrán *
6. Fedő *
7. Szilikon cső
8. Duckbill szelep *
9. Cumisüveg *
10. Etetőcumi *
11. USB tápellátás
12. Főmotor

Figyelem! A "*" -gal jelölt alkatrészek a GIO-350RO-ban két készlettel szerepelnek.

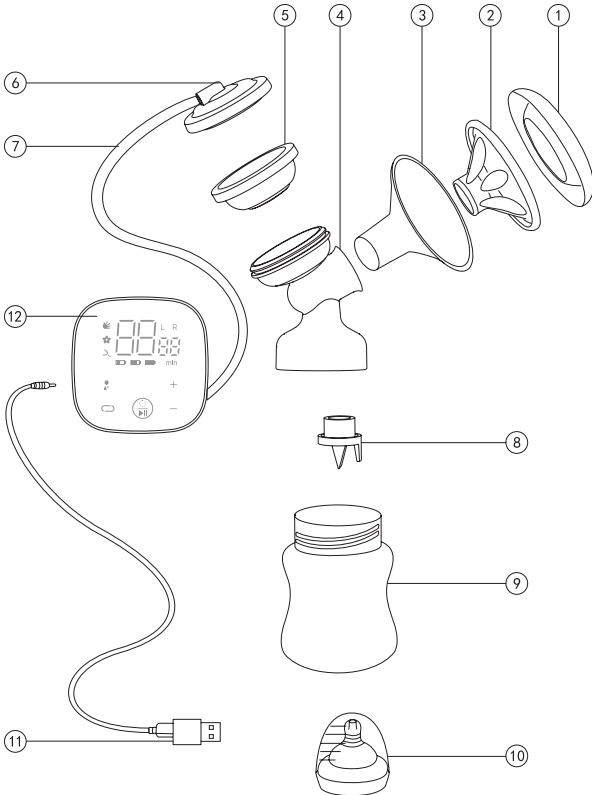




Felkészülés a használatra és az összeszerelésre 03

A főmotor kivételével minden alkatrészt minden használat után meg kell tisztítani, és minden használat előtt fertőtleníteni kell a 10. "Tisztítás és fertőtlenítés" című fejezetben leírtak szerint.

A mellszívó összeszerelése

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a mellszívó minden alkatrészét (a főmotor kivételével) megtisztította és fertőtlenítette. Alaposan mosson kezet, mielőtt hozzáér a megtisztított részekhez. Legyen óvatos! A megtisztított alkatrészek még nagyon forróak lehetnek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi szerelési ábrát:

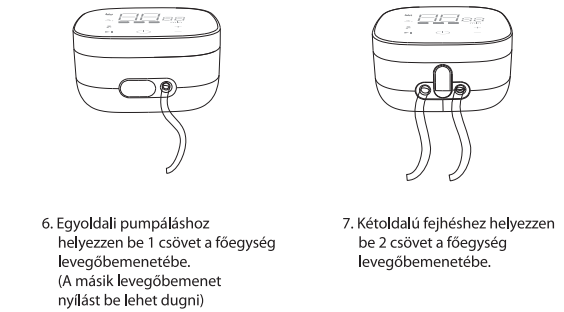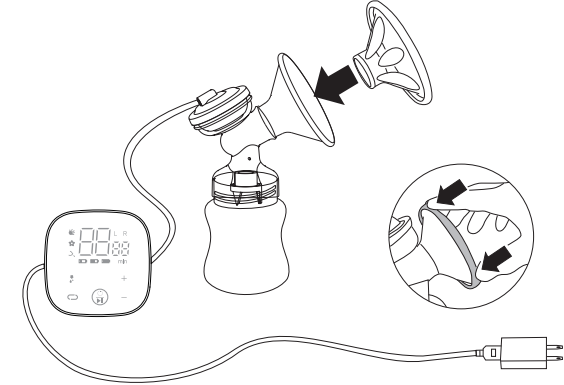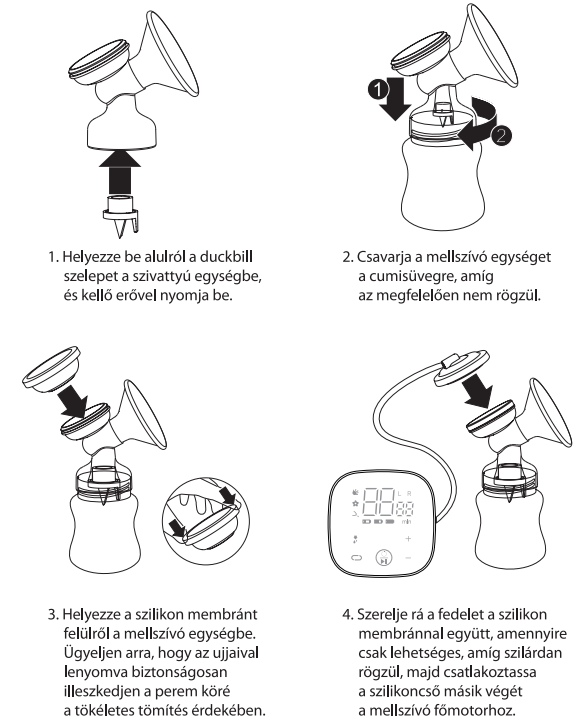

Megjegyzés: Ha GIO-350PRO készülékkel rendelkezik, kérjük, csatlakoztassa a főgépet a főegységhez.

Akkumulátor használata 05

TÖLTÖTTSÉGI ÁLLAPOT	
	Teljesen feltöltött állapotban a mellszívó 2,5 órán keresztül működik (61-100%)
	Félig töltött akkumulátor (31-60%)
	Alacsony akkumulátor (5-30%)
	Töltés
Figyelem! Ne töltsd az akkumulátort 24 óránál tovább, mert megsérülhet.	

Hibaelhárítás

Szívás hiánya Vizsgálja meg, hogy a mellszívó alkatrészei helyesen vannak-e összeszerelve, és ellenőrizze, hogy a szelep nem tört-e el (Megjegyzés: tisztítás közben soha ne dörzsölje), hogy a szilikon membrán és a masszázspárna szorosan illeszkedik-e a szivattyútesthez az ideális tömítési állapot elérése érdekében.

Nem lehet tejet kifejteni Győződjön meg arról, hogy a szívás elegendő és a mellszívó helyesen van-e összeszerelve. Nyugodjon meg, lazuljon el és próbálkozzon újra, az anyatej az ismételt próbálkozások után lehet lefejni. Figyeljen a sikeres mellszíváshoz szükséges tippekre.

Fájdalmat érez használat közben A fájdalom lehetséges oka a túlzott erősségű szívás. Nem kell a mellszívóban elérhető legmagasabb szívási fokozatot használni. Használja a masszázis módot a masszázis stimulációhoz, majd váltson fejő üzemmódra. Konzultálhat egészségügyi szakértőkkel vagy szoptatási szakértőkkel is.

Be-/kikapcsolási probléma Kérjük, ellenőrizze, hogy az USB tápegység megfelel-e az 5V 1A szabványnak, csatlakoztassa a szivattyút a számítógép USB-csatlakozójához, vagy egy okostelefon segítségével tesztelje az eredeti adaptert. Ha az akkumulátor lemerült, használat előtt töltsd fel a terméket.

Visszaáramlás Baleset esetén, például ha tejet vagy vizet talál a szilikon membránban vagy a szilikoncsőben, kapcsolja ki a készüléket, tisztítsa meg és szárítsa meg levegőn. Ha a szilikon membrán megsérült, cserélje ki a membránt.

Mellszívó használata 06

Mikor kell az anyatejet lefejni

Ajánlatos (hacsak az egészségügyi szakembere/laktációs tanácsadója másként nem tanácsolja) megvárni, amíg a tej mennyisége és a szoptatási menetrend kialakul (általában legalább 2-4 héttel a szülés után).

Kivételek:

1. Ha tejet kell lefejni a csecsemő számára, hogy a kórházban etethesse meg.
2. Ha a mellei duzzadtak (fájdalmasak vagy duzzadtak): kis mennyiségű tejet lefejthet szoptatás előtt vagy között, hogy enyhítse a fájdalmat, és megkönnyítse a baba szoptatását.
3. Ha mellbimbói fájnak vagy hegesek, repedezettek, akkor addig fejezhet, amíg meg nem gyógyulnak.
4. Ha elválasztják a babájától, és szeretné folytatni a szoptatást, amikor újra együtt lesznek, akkor rendszeresen fejejen ki tejet, hogy serkentse a tejképződést.

Tippek a sikeres fejéshez

Válassza ki a legjobb napszakot a tej lefejtésére, pl. reggel, amikor bőséges a tej, a baba első szoptatása előtt vagy után, szívia le a tejet, ha a baba nem issza meg közvetlenül. Ha az anyuka dolgozik, akkor a munkaidő alatti pihenés közben is lefejtheti a tejet. A mellszívó használata gyakorlást igényel, előfordulhat, hogy többször is meg kell próbálnia használni, hogy sikerüljön. Szerencsére ezt a mellszívót könnyű összeszerelni és használni, gyorsan és ügyesen fogja használni a tej lefejtésére.

Az első használat előtt ismerkedjen meg a mellszívóval és annak működésével. Válasszon olyan időpontot, amikor nem siet, és nem fogják megzavarni. Egy fénykép a babáról segíthet az "elengedési" reflex kialakulásában. A meleg is segíthet: próbáljon meg fürdés vagy zuhanyzás után fejni, vagy tegyen meleg ruhát a mellére néhány percre, mielőtt elkezdje a fejést. Előfordulhat, hogy könnyebben feji le a tejet, amikor a baba a másik mellről szopik, vagy közvetlenül az után, hogy megszojtatta.

Ha a fejés fájdalmassá válik, hagyja abba, és forduljon szoptatási tanácsadójához vagy egészségügyi szakemberhez.